



FLEX NIGHT PLUS DIGITÁLIS HŐMÉRŐ

REF.: 000 09812 000 100



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

REV.00-00/2025 46 009812 000 100_00_00_2025_1

Használat előtt figyelmesen olvassa el a figyelmeztetéseket és az utasításokat, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.



FIGYELMEZTETÉSEK:

A digitális hőmérő használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.

- Ez a készülék nem játék, és gyermekek elől elzárva, biztonságos helyen kell tartani. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a hőmérséklet mérése közben. A hőmérő apró alkatrészeket (elemeket stb.) tartalmaz, amelyek lenyelése esetén károsak lehetnek.
- Fulladásveszély: A hőmérőkupak és az elem lenyelése halálos lehet. Ne engedje, hogy a gyermekek szülői felügyelet nélkül használják a készüléket.
- Ne használja a hőmérőt fülben. Kizárólag száján át, végbélből és hónaljából (axilla) történő mérésre szolgál.
- Ne helyezze a hőmérő elemét extrém hő közelébe, mert felrobbanhat.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet.
- A hőmérsékletmérés öndiagnózisra való használata veszélyes. Az eredmények értelmezéséhez forduljon orvosához. Az öndiagnózis a meglévő betegségek súlyosbodásához vezethet.
- Ne próbáljon meg méréseket végezni, ha a hőmérő nedves, mivel pontatlan mérési eredményeket eredményezhet.
- Ne harapja meg a hőmérőt. Ez töréshez és/vagy sérüléshez vezethet.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a hőmérőt. Ez pontatlan mérési eredményeket eredményezhet.
- Minden használat után fertőtlenítsa a hőmérőt, különösen akkor, ha a készüléket egynél több személy használja.
- Ne erőltesse a hőmérőt a végbélnyílásba.
- Kerülje a készülék más készülékek melletti vagy egymásra helyezett használatát, mert ez nem megfelelő működéshez vezethet. Ha ilyen használat szükséges, ezt a készüléket és a többi készüléket kell megfigyelni, hogy megfelelően működjenek-e.
- A HORDOZHATÓ RF (rádiófrekvenciás) kommunikációs berendezéseket (beleértve a perifériákat, például az antennakábeleket és a külső antennákat) nem szabad 30 cm-nél közelebb használni a készülék bármely részéhez, beleértve a gyártó által meghatározott kábeleket is. Ellenkező esetben a készülék teljesítménye romolhat.
- Nem használható oxigénben gazdag környezetben és gyúlékony altatószer-keverék levegővel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal való jelenlétében.
- Ne tegye a hőmérőt közvetlen napfényre vagy vattacsomóba, mert ez befolyásolja a pontosságát.
- A készüléket használat közben nem szabad tisztítani és fertőtleníteni.
- A készülékkel kapcsolatban felmerült minden súlyos incidenst jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÁS

Páciensek vagy egészséges emberek, akik testhőmérsékletüket szeretnék megmérni, valamint egészségügyi dolgozók, akik a beteg testhőmérsékletét szeretnék megmérni.

Páciens célcsoport: Páciensek vagy egészséges emberek, akiknek testhőmérsékletüket kell megmérni, vagy akik szeretnék maguknak megmérni.

RENDELTETÉSSZERŰ FELHASZNÁLÓ / HASZNÁLATI JAVALLAT

Páciensek vagy egészséges személyek, akik testhőmérsékletüket szeretnék megmérni, valamint egészségügyi dolgozók, akik a beteg testhőmérsékletét szeretnék megmérni.

Páciens célcsoport: Páciensek vagy egészséges személyek, akiknek testhőmérsékletüket kell vagy szeretnék maguknak megmérni.

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL

Ez a digitális hőmérő gyorsan és rendkívül pontosan méri a testhőmérsékletet. A funkcióinak jobb megértése és az évekig megbízható eredmények biztosítása érdekében kérjük, először olvassa el az összes utasítást.

Ez a készülék a következő szabványoknak felel meg:


ISO 80601-2-56 Orvosi elektromos berendezések — 2-56. rész: A testhőmérséklet mérésére szolgáló klinikai hőmérők alapvető biztonságára és alapvető teljesítményére vonatkozó speciális követelmények, EN 60601-1-11 Gyógyászati villamos készülékek. 1-11. rész: Általános biztonsági és alapvető működési követelmények. Kiegészítő szabvány: A lakókörnyezeti egészségügyi ellátásban használatos gyógyászati villamos készülékek és a gyógyászati villamos rendszerek követelményei; EN 60601-1-2 (EMC) és az IEC/EN60601-1 szabványok (biztonsági) követelményei.

A gyártó ISO 13485 tanúsítvánnyal rendelkezik.

TARTALOM

1 hőmérő, 1 használati útmutató, 1 tárolótok.

Ábra 1.

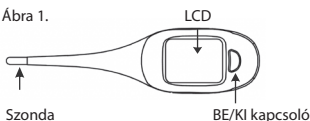

FIGYELMEZTETÉS

*A készülék teljesítménye romolhat, ha az alábbiak közül egy vagy több bekövetkezik:

- Kültéri használat;
- A gyártó által megadott hőmérséklet- és páratartalom-tartományon kívüli tárolás;
- Mechanikai ütés (például leejtés) vagy sérült érzékelő.
- Ne használja a hőmérőt, ha a külső burkolat sérült.

*A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikáció befolyásolhatja az eszközt. Az eszközzel kapcsolatban különleges elektromágneses összeférhetőségi (EMC) előírásoknak megfelelően kell eljárni, a mellékelt dokumentációban található EMC-információk szerint.

SZIMBÓLUMOK ÉRTELMEZÉSE

	Vigyázat		A légköri nyomás korlátozása
	Bf típusú alkalmazott alkatrész		Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben
	Gyártó		A termék és a használt elemek ártalmatlanítását az elektronikus termékek ártalmatlanítására vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően kell végezni.
	MRI nem biztonságos		
	Gyártási dátum		A CE 0123 megfelelőségi jelölés a bejelentett szervezet azonosító számát jelenti
	Gyártási tételezszám		Tárolás és szállítás Hőmérséklethatár: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)
	Lásd a használati útmutatót		Importőr
	Hasznosítható/újrahasznosítható általános szimbólum		Disztribútor
	Tárolás és szállítás Páratartalom: 15%~95% relatív páratartalom		Svájci meghatalmazott képviselő
	Orvostechnikai eszköz		Egyedi eszközazonosító
IP22	Az első 2-es szám: 12,5 mm-es vagy annál nagyobb átmérőjű szilárd idegen tárgyak ellen védett. A második 2-es szám: A készülékben nem tehetnek kárt a függőlegesen hulló vízcspekkel abban az esetben sem, ha a készülék a függőlegeshez képest maximum 15° fokkal meg van döntve bármelyik irányban.		

MŰSZAKI ADATOK

Típus:	Digitális hőmérő (nem prediktív)
Mérés tartomány:	32,0°C ~ 42,9°C (90,0°F ~ 109,9°F) (°C/°F a gyártó választása szerint)
Pontosság:	±0,1°C (±0,2°F) 35,5°C ~ 42,0°C (95,9°F ~ 107,6°F) hőmérsékleten 18°C ~ 28°C (64,4°F) környezeti üzemi tartományban, ±0,2°C (±0,4°F) egyéb mérési és környezeti üzemi tartomány esetén.
Üzemmód:	Közvetlen kontaktmérés
Kijelző:	Folyadékkristályos digitális kijelző 3-1/2
Memória:	Az utolsó mért értéket eltárolja
Elem:	1 db CR2032 típusú 3V-os tartós lítium gomelem
Elem élettartam:	Kb. 200 óra folyamatos működés vagy 1 év napi 3 méréssel
Méreték:	13,5 cm × 3,4 cm × 1,7 cm (H × Sz × M)
Súly:	Kb. 26 gramm elemmel együtt
Várható élettartam:	3 év
Környezeti működési tartomány:	
Hőmérséklet:	5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F) Relatív páratartalom: 15% ~ 95% relatív páratartalom
Légköri nyomás:	70 kPa ~ 106 kPa
Tárolási és szállítási állapot:	
Hőmérséklet:	-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) Relatív páratartalom: 15% ~ 95% relatív páratartalom
Légköri nyomás:	70 kPa ~ 106 kPa
Védettségi besorolás:	IP 22
Besorolás:	Bf típus
Ellenjavallat:	Nincs ellenjavallat

°C/°F ÁTKAPCSOLÁS

A hőmérséklet-értékek Celsius vagy Fahrenheit skálán érhetőek el (°C/°F; az LCD jobb felső sarkában található). Kikapcsolt készülék mellett nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot körülbelül 2 másodpercig az aktuális beállítás módosításához.

1. Nyomja meg az LCD kijelző melletti Be/Ki gombot. Hangjelzés hallható, ahogy a képernyőn megjelenik a ...1888..., majd az utolsó rögzített hőmérséklet látható. Az önteszt hőmérsékletének megjelenítése után a hőmérő most már mérés üzemmódban van.

2. Helyezze a hőmérőt a kívánt helyre (száj, végbél vagy hónalj).

a) Szájánál történő használat: helyezze a hőmérőt a nyelv alá a 2. ábrán látható „V” pozícióban. Csukja be a száját, és lélegezzen egyenletesen az orron keresztül, hogy megakadályozza a belélegzett/kilélegzett levegő hatását a mérésre.

b) Végbélben történő használat: kenje be az ezüst szonda hegyét a könnyű behelyezés érdekében. Óvatosan helyezze be az érzékelőt körülbelül 1 cm-re (kevesebb, mint 1/2 hüvelyk) a végbélbe.

3. Hónaljból történő használat: törölje szárazra a hónaljait. Helyezze a szondát a hónaljba, és tartsa a kart erősen oldalra nyomva. Orvosi szempontból ez a módszer mindig pontatlan méréseket ad, és nem szabad használni, ha pontos mérésekre van szükség.

4. A fókusz a tesztelés során végig villog. Amikor a villogás megszűnik, egy riasztás kb. 10 másodpercig szól. A mért érték egyidejűleg megjelenik az LCD kijelzőn. A jelzőhang (sípoló hang) megszólalásáig eltelt minimális mérési időt kivétel nélkül fenn kell tartani. A mérés a sípzó értesítése után is folytatódik. A jobb testhőmérséklet-mérési eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a szondát a sípoló hangtól függetlenül körülbelül 2 percig tartsa a szájban vagy a végbélben, vagy körülbelül 5 percig a hónaljban, és legalább 30 másodperces mérési intervallumot kell betartani.

*Megjegyzés: A normál hangjelzés hangja „Bi-Bi-Bi-Bi-”; riasztás esetén sípoló „Bi-” Bi-Bi-Bi” ---Bi-Bi” ---”, „Bi-Bi-Bi” hangok hallhatók, amennyiben a páciens hőmérséklete eléri a 37,8 °C-ot (100,0 °F) vagy magasabbat.


5. Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében a tesztelés befejezése után nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék kikapcsolásához. Ha nem tesz semmit, a készülék körülbelül 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

MEMÓRIA MÓD

- 1. Kapcsolja be a hőmérőt.
- 2. Az utolsó mérés memória kijelzése közben nyomja meg és tartsa lenyomva a Be/Ki gombot, amíg a készülék memória módba nem lép.
- 3. Nyomja meg ismét a gombot az utolsó 10 memória ellenőrzéséhez.
- 4. Tartsa lenyomva a Be/Ki gombot 3 másodpercig, vagy várjon egy percet a memória módból való kilépéshez.

LÁZJELZŐ FEVERLINE TECHNOLOGIA

Minden mérés befejezésekor a kijelzőn látható háromszög alakú nyíl a különböző hőmérsékleti tartományoknak megfelelően jelzi a hőmérsékletet. A háromszög alakú nyíl magyarázata: Például:

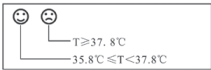

Megjegyzés: Ha a hőmérséklet 35,8°C (96,4°F) alatt van, a háromszög alakú nyíl nem jelenik meg.

HIBAELHÁRÍTÁS

Hibaüzenet	Probléma	Megoldás
Lo	A mért hőmérséklet alacsonyabb, mint 32,0 °C (90,0 °F)	Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy percet, majd mérjen új hőmérsékletet szoros érintkezés és elegendő pihenés segítségével.
Hi	A mért hőmérséklet magasabb, mint 42,9°C (109,9°F)	Kapcsolja ki a készüléket, várjon egy percet, majd mérjen új hőmérsékletet szoros érintkezéssel és elegendő pihenéssel.
Err	A rendszer nem működik megfelelően.	Vegye ki az elemet, várjon 1 percet, majd tegye vissza és kapcsolja be újra. Ha az üzenet újra megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel a szervizelés érdekében.
	Lemerült elem: Az elem ikon villog, nem lehet mérést végezni.	Cserélje ki az elemet.

ELEMCSERE

- Cserélje ki az elemet, ha a „” szimbólumot látja az LCD kijelző alsó részén.
 - Helyezzen egy vékony eszközt, például egy pénzérmét, az elemtartó fedelére. Forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a fedél le nem jön (lásd a 3. ábrát).
 - Használjon nem fémes eszközt, például egy tollat, a régi elem eltávolításához az elemtartóból (lásd a 4. ábrát).
 - Helyezzen egy új elemet a rekeszbe a pozitív oldalával felfelé (lásd az 5. ábrát).
 - Egy vékony eszközzel fordítsa el a fedelet az óramutató járásával megegyezően, amíg a „” jelzés a „” felé néz. (Lásd a 6. ábrát)
- Megjegyzés: Az elemsere alábbi vázlatos rajza a hőmérő hátuljáról készült.



3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra

A helyi hulladékkezelési szabályoknak megfelelően dobja ki az elemet.

KALIBRÁLÁS

A hőmérőt a gyártás során kalibrálják. Ha a hőmérőt a használati utasításnak megfelelően használják, időszaksok utánállítás nem szükséges. Javasoljuk azonban a kalibrálás ellenőrzését két évente, vagy ha a hőmérő klinikai pontossága kétségbe vonható. Állítsa be a nagy pontosságú vízfürdő hőmérsékletét 33°C / 91°F, 37°C / 99°F, 42°C / 108°F értékre. Kapcsolja be a hőmérőt, helyezze be a nagy pontosságú vízfürdőbe, majd ellenőrizze a hőmérő laboratóriumi pontosságát. Ismételje meg az előző mérési folyamatot, miután 10 percig stabilizálódott. Ha a hőmérő eredménye nem kalibrált, kérjük, küldje el a teljes készüléket a kereskedőnek vagy a gyártónak. A fenti ajánlások nem írják felül a jogi követelményeket. A felhasználónak mindig be kell tartania a készülék mérésének, működésének és pontosságának ellenőrzésére vonatkozó jogi követelményeket, amelyeket a készülék használatának helyén a vonatkozó törvények, irányelvek vagy rendeletek hatálya előír.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

- Mártsa a hőmérő szondáját legalább 1 percre desztillált vízbe;
 - A hőmérő használat előtti és utáni tisztítását szappannal és hideg vízzel végezheti.
 - Fertőtlenítse a hőmérőt alkoholba áztatott vattacsomóval vagy törölruhával, vagy mártsa a hőmérő fertőtlenítő oldatba. A fertőtlenítő oldat hőmérséklete nem haladhatja meg a 42°C-ot.
- A hőmérő károsodásának elkerülése érdekében kérjük, vegye figyelembe és tartsa be a következőket:
- Ne használjon benzolt, festékhígítót, benzint vagy más erős oldószereket a hőmérő tisztításához.
 - Ne próbálja meg fertőtleníteni a hőmérő érzékelő szondáját (hegyét) alkoholba vagy forró vízbe (50°C feletti vízbe) merítéssel hosszú ideig.
 - Ne használjon ultrahangos mosást a hőmérő tisztításához.

GARANCIA

A hőmérőre a magyar jogszabály szerinti garancia vonatkozik. Ha a hőmérő hibás alkatrészek vagy nem megfelelő kivitelezés miatt nem működik megfelelően, ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia - az elem kivételével - minden más alkatrészre vonatkozik. A garancia nem terjed ki a hőmérő nem megfelelő használatából eredő károsodásokra. A garanciális szolgáltatás igénybevételéhez a kereskedőtől származó vásárlási blokk eredeti példánya vagy másolata szükséges. A szoftverazonosító a szoftverérvényesítési jelentés dokumentumra utal, a fájlkód JYR210524001, a fájl verziója pedig A0.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁSI INFORMÁCIÓK

A készülék megfelel az IEC 60601-1-2 nemzetközi szabvány EMC követelményeinek. A követelmények az alábbi táblázatban leírt feltételek mellett teljesülnek. Az eszköz egy elektromos orvostechnikai eszköz, és az EMC tekintetében különleges óvintézkedések vonatkoznak rá, amelyeket a használati útmutatóban kell közzétenni. A hordozható és mobil magas frekvenciájú (HF) kommunikációs berendezések hatással lehetnek a készülékre. A termék nem jóváhagyott tartozékokkal történő használata negatívan befolyásolhatja a működést, és megváltoztathatja az elektromágneses kompatibilitást. Az eszközt nem szabad közvetlenül más elektromos berendezések mellett vagy között használni.

1. Táblázat

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – Elektromágneses kibocsátás	
A készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra tervezték. A vásárlónak vagy a készülék használatjának gondoskodnia kell arról, hogy az eszközt ilyen környezetben használják.	
Kibocsátási teszt	Megfelelőség
CISPR 11 Vezetett kibocsátás	Nem alkalmazható

CISPR 11 Sugárzott kibocsátás	1. csoport B osztály
Harmonikus kibocsátás IEC 61000-3-2	Nem alkalmazható
Feszültségingadozás/villogás kibocsátás IEC 61000-3-3	Nem alkalmazható

2. Táblázat

Elektromágneses kompatibilitási információk - elektromágneses immunitás		
A készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra tervezték. A készülék vásárlójának vagy felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.		
Immunitási teszt	IEC 60601 TESZTSZINT	MEGFELELŐSÉGI SZINT
Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2	+8kV kontaktkisülés +2kV, +4kV, +8 kV, +15kV levegő	+8kV kontaktkisülés +2kV, +4kV, +8kV, +15kV levegő
Elektrosztatikus transziens/robbanás IEC 61000-4-4	+2kV tápvezetékekhez 100 kHz ismétlési frekvencia +1kV bemeneti/kimeneti vezetékekhez	N/A
Tűlfeszültség-tűrés IEC 61000-4-5	+0,5kV, +1kV differenciál üzemmód (vonal-vonal)	N/A
Feszültségesések, rövid megszakítások és feszültségingadozások a tápellátás bemeneti vonalain IEC 61000-4-11	0% UT (100 %-os süllyedés az UT-ban) 0,5 ciklusra 0°, 45°-nál, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° és 315° 0% UT (100 %-os süllyedés az UT-ban) 0°-os ciklushoz 70% UT (30% süllyedés UT-ban) 25/30 ciklushoz 0°-on 0% UT (100% süllyedés UT-ban) 250/300 ciklushoz 0°-on	N/A
Teljesítményműködési (50/60Hz) mágneses tér IEC 61000-4-8	30 A/m, 50/60Hz	30 A/m, 50/60Hz
MEGJEGYZÉS: Az UT a teszt szint alkalmazása előtti váltakozó áramú hálózati feszültség.		

3. Táblázat

Elektromágneses kompatibilitási információk - elektromágneses immunitás		
A készüléket az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való használatra szánták. A készülék vásárlójának vagy felhasználójának gondoskodnia kell arról, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.		
Vezetett RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz és 80 MHz között. 6 Vrms 150 kHz és 80 MHz között az ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávon kívül	N/A
Kisugárzott RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz-től 2,7 GHz-ig	10 V/m
Közelégi mágneses mezők IEC 61000-4-39	30kHz, 8 A/m. CW 134, 2kHz, 65A/m Impulzus-szélesség moduláció 2,1kHz 13,56 kHz, 7,5 A/m Impulzus-szélesség moduláció 50 kHz	Impulzus-szélesség moduláció 2,1 kHz 13,56 kHz, 7,5 A/m, Impulzus-szélesség moduláció 50 kHz
1. MEGJEGYZÉS: 1 a 80 MHz és 800 MHz esetén, a magasabb frekvenciataromány érvényes. 2. MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy ezek az irányelvek nem érvényesek minden helyzetben. Az elektromágneses sugárzás terjedését befolyásolja a struktúráról, tárgyakról és emberekről való elnyelődés és visszaverődés. a) A 0,15 MHz és 80 MHz közötti ISM (ipari, tudományos és orvosi) sávok 6765 MHz és 6795 MHz között vannak; 13 553 MHz - 13 567 MHz; 26 957 MHz - 27 283 MHz; és 40,66 MHz és 40,70 MHz között. A 0,15 MHz és 80 MHz közötti rádióamatőr sávok 1,8 MHz - 2,0 MHz, 3,5 MHz-től 4,0 MHz-ig, 5,3 MHz-től 5,4 MHz-ig, 7 MHz-től 7,3 MHz-ig, 10,1 MHz-től 10,15 MHz-ig, 14 MHz-től 14,2 MHz-ig, 18,07 MHz-től 18,17 MHz-ig, 21,0 MHz-től 21,4 MHz-ig, 24,89 MHz-től 24,99 MHz-ig, 28,0 MHz-től 29,7 MHz-ig és 50,0 MHz-től 54,0 MHz-ig. b) A megfelelési szintek a 150 kHz és 80 MHz közötti ISM frekvenciasávokban és a 80 MHz és 2,7 GHz frekvenciatarományban csökkentik annak valószínűségét, hogy a mobil/hordozható kommunikációs berendezések interferenciát okozzanak, ha véletlenül a páciens közelébe kerülnek. Emiatt egy további 10/3-os tényezőt építettek be az ezekben a frekvenciatarományokban lévő adók ajánlott távolsági távolságának kiszámításához használt képletekben. c) A helyhez kötött adók, például rádiótelefonok (mobil/vezeték nélküli) bázisállomái és földi mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádióadások és TV adások térorrőssége elméletileg nem jósolható meg pontosan. A rögzített rádiófrekvenciás adók által okozott elektromágneses környezet felméréséhez meg kell fontolni egy elektromágneses helyszíni felmérést. Ha a mért térorrősség azon a helyen, ahol az eszközt használják, meghaladja a vonatkozó rádiófrekvenciás megfelelési szintet, az eszközt figyelni kell a normál működés ellenőrzése érdekében. Ha rendellenes működést észlel, további intézkedésekre lehet szükség, például a készülék átállítására vagy áthelyezésére. d) A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatarományban a térorrősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.		

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás (RF) kommunikációs berendezések és az eszköz javasolt távolsága.				
A készülék olyan elektromágneses környezetben való használatra készült, amelyben a kisugárzott rádiófrekvenciás zavarok kontrollálva vannak. Az ügyfél vagy t!1: az eszköz felhasználója segíthet megelőzni az elektromágneses interferenciát azáltal, hogy betartja az RF vezeték nélküli kommunikációs berendezés és az eszköz közötti minimális távolságot az alábbiak szerint, a kommunikációs berendezés maximális kimeneti teljesítményének megfelelően..				
Frekvencia MHz	Maximális teljesítmény W Elválasztási távolság az adó frekvenciája szerint m	Távolság	Testszint mnc 60601	Megfelelőségi szint
385	1,8	0,3	27	27
450	2	0,3	28	28
710	0,2	0,3	9	9
745				
780				
810				
870	2	0,3	28	28
930	2	0,3	28	28
1720				
1845				
1970				
2450	2	0,3	28	28
5240	0,2	0,3	9	9
5500				
6785				
Megjegyzés I.: Előfordulhat, hogy ezek az irányelvek nem vonatkoznak minden helyzetre. Az elektromágneses terjedést befolyásolja a szerkezetek, tárgyak és emberek elnyelése és visszaverődése.				

FIGYELMEZTETÉSEK:

Ezt az eszközt nem használja más elektronikus berendezések, például mobiltelefon, adó-vevő vagy rádióvezérlő termékek közelében vagy felettük. Ha ezt meg kell tennie, figyelje meg a hőmérték, hogy ellenőrizze a normál működését.

A megadottól eltérő tartozékok és tápkábel használata – kivéve a berendezés vagy rendszer gyártója által a belső alkatrészek cserealkatrészeként értékesített kábeleket – a berendezés vagy rendszer zavar kibocsátásának növekedéséhez vagy a zavartűrés csökkenéséhez vezethet. A kezelőnek biztosítania kell az elektromágneses kompatibilitás (EMC) tekintetében az alapvető biztonságot és az alapvető teljesítményt.

EZ A TERMÉK MEGFELEL A 2012/19/EU IRÁNYELVNEK.

A készüléken található áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket élettartama végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani, akár a elektromos és elektronikus készülékek számára kijelölt külön hulladéklerakó helyre, vagy hasonló készülék vásárlásakor vigye vissza a kereskedőhöz. A felhasználó felelőssége, hogy a készüléket élettartama végén speciális hulladéklerakó helyre vigye. Ha a nem kívánt készüléket megfelelően, külön hulladékként gyűjtik, az újrahasznosítható, kezelhető és környezetbarát módon ártalmatlanítható; ez elkerüli a környezetre és az egészségre gyakorolt negatív hatást, és hozzájárul a termék anyagainak újrahasznosításához. A rendelkezésre álló hulladékkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

EZ A TERMÉK MEGFELEL AZ EU 2023/1542 SZÁMÚ RENDELETNEK.

Az akkumulátoron vagy a csomagolásán található áthúzott kuka szimbólum azt jelenti, hogy az elemeket élettartamuk végén a kommunális hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyeken, vagy új, egyenértékű újratölthető vagy nem újratölthető elemek vásárlásakor vissza kell juttatni a kereskedőhöz. Az áthúzott kerekes kuka szimbólum alatt nyomtatott Hg, Cd, Pb kémiai szimbólumok az elemekben található anyag típusát jelzik: Hg = Higany, Cd = Kadmium, Pb = Ólom. A felhasználó felelős azért, hogy az elemet a termék élettartamának végén megfelelő hulladéklerakóba vigye feldolgozás és újrahasznosítás céljából. Ha a lemerült elemeket megfelelően, külön hulladékként gyűjtik, akkor azok újrahasznosíthatók, feldolgozhatók és környezetbarát módon ártalmatlaníthatók; ez elkerüli a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatást, és hozzájárul az elemekben található anyagok újrahasznosításához. A termék felhasználó általi nem megfelelő ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet és az emberi egészséget. A hulladékkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért forduljon a helyi hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.



JOYTECH Healthcare Co., Ltd.
No.365, Wuzhou Road, 311100 Hangzhou,
Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel:+86-571-81957767



Shanghai International Holding Corp.
GmbH(Europe) Eifflstrasse 80, 20537 Hamburg,
Germany



MedEnvoy Global BV
Gotthardstrasse 28 6302 Zug
Switzerland



Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 1 - 22070 Grandate (CO) - Italy
www.chicco.com



Document No.: JDMT-4104-008
Article No.: 005
Version: A
Date of Issue: 2021.04
Model: DMT-4726

Származás: Kína

Magyarországi forgalmazó: H-1113 Budapest, Badacsonyi u. 24.
Tel: +3612092633, Email: babycare@babycare.hu, www.chicco.hu