

Corax-X

Egylépéses Terhességi Teszt

házi használatra, közepsugaras vizelethől

A teszt működése

A terhes nőkben hCG (humán choriogonadotropin) hormon termelődik. Ez a hormon a méhlepény fejlődésével együtt fokozatosan kiválasztódik a fogamzást követően és a kiválasztódott mennyiség folyamatosan emelkedik az első trimeszter során.

A „Corax-x” házi terhességi teszt a vizelet humán choriogonadotropin hormonjának (hCG) gyors, kvalitatív kimutatását teszi lehetővé.

A teszt nagy érzékenysége révén már a menstruációs vérzés elmaradásának első napján kimutatható a terhesség.

A pozitív eredmény nagy valószínűséggel terhességet jelent, amikor is szakorvoshoz kell fordulni.

A negatív eredmény a hCG hiányát jelzi, azaz a páciens valószínűleg nem terhes. Ha a teszt negatív eredményt ad és a menstruációs vérzés 5 napon belül nem jelentkezik, a meghatározást meg kell ismételni. Ha a második teszt is negatív, szakorvoshoz kell fordulni.

HOGYAN MŰKÖDIK A CORAX-X EGYLÉPÉSES TERHESSÉGI TESZT?

Anyagok és reagensek


Minden Corax-x terhességi tesztcsomag tartalmazza a kivitelezéshez szükséges összes anyagot. Ez magába foglalja a reakciótubust. A tubusban monoklonális és poliklonális antitesttel fedett membrán, valamint fehérje mátrixot tartalmazó lapka van, amely egy IgG monoklonális antitest és festék konjugátumot tartalmaz. A tubus légmentesen lezárt csomagolásban található. A tesztcsomag nem tartalmazza a kimutatáshoz szükséges időmérő eszközt.

TEENDŐK A TESZT ELVÉGZÉSÉT MEGELŐZŐEN

- Figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ne nyissa ki a tesztet tartalmazó műanyag tasakot a teszt felhasználása előtt.
- Ne használja a tesztet a csomagoláson feltüntetett szavatossági határidő lejártá után.
- Használjon órát vagy stoppert a teszt eredményének leolvasásához.
- Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal vevőszolgálati telefonszámunkon munkanapokon 9:00 és 17:00 között.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Nyissa fel a csomagolást a bevágás mentén, vegye ki az eszközt.
- Vegye le a eszközön levő fedőkupakot. (lásd. 1. ábrán)

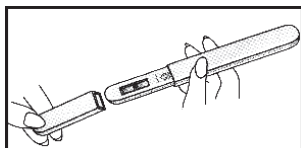


1

- Tartsa az eszközt függőlegesen úgy, hogy az ablaknyílásos oldala legyen Önnel szemben, a tripla abszorbeáló ablakok pedig az eszköz alsó részén helyezkedjenek el. (lásd. 2. ábrán)




2

- Engedjen az abszorbeáló ablakokra a vizeletéből, lehetőleg a közepsugaras frakcióból legalább 6 másodpercen keresztül. Figyelem: ettől a ponttól kezdve ügyelni kell arra, hogy az abszorbeáló ablakok mindig lejjebb legyenek, mint az eszköz másik, csepp szimbólumot mutató része! (lásd. 3. ábrán)

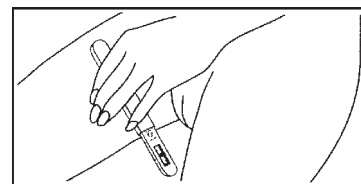


3

- Tegye vissza a kupakot az abszorbeáló ablakokra (az eszköz alsó részére).
- Forgassa el az eszközt hosszanti tengelye mentén úgy, hogy az ablaknyílásos felület alulra kerüljön. (Az abszorbeáló vég továbbra is lefelé mutasson. Az eszközt ekkor leteheti egy sima felületre is, ügyelve arra, hogy az abszorbeáló vég továbbra se kerüljön a másik végnél magasabbra!)
- A reakcióablakokban megfigyelhető a rózsaszín vonal/vonalak láthatóvá válása.
- Öt perc elteltével a teszt értékelhető. A reakcióablakok közül a kisebb a kontroll-ablak, a nagyobb a tesztابلak. A kontroll-ablak a teszt működőképességét jelzi, a reakcióablak mutatja a teszt eredményét.

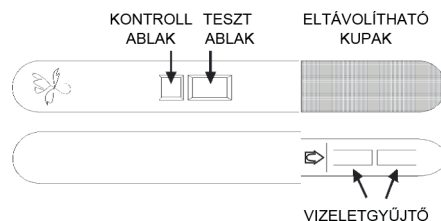

AZ EREDMÉNY ÉRTÉKELÉSE

A teszt elvégzése után egy rózsaszín vonal jelenik meg a (kisebb) kontroll-ablakban. Ez azt jelzi, hogy a Corax-x terhességi teszt megfelelően működik. A teszt eredménye a (nagyobb) teszt-ablakban olvasható le.

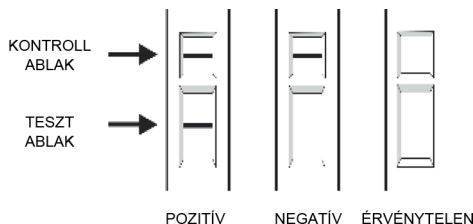

POZITÍV EREDMÉNY:

A vizelet felvitel után 5 perc múlva egy vöröses-rózsaszín vonal jelenik meg a (nagyobb) tesztablakban. Ez azt jelenti, hogy ön valószínűleg terhes.

NEGATÍV EREDMÉNY:

A (nagyobb) tesztablakban nem figyelhető meg rózsaszín vonal. Ön valószínűleg nem terhes.

Megjegyzés: Az eredmény akkor is pozitívnak tekinthető, ha a (nagyobb) tesztablakban megjelenő vonal halványan látszik.

Figyelem! Ha a (kisebb) kontroll-ablakban nem figyelhető meg rózsaszín vonal, akkor vagy nem követte a használati utasítást, vagy a teszt nem megfelelően működött. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és ismételje meg a tesztet egy másik Corax-x terhességi teszttel.

TÁROLÁS ÉS STABILITÁS

A Corax-x terhességi tesztet szobahőmérsékleten (15-30 C) ° kell tartani. Soha ne használjon lejárt szavatossági idejű tesztet.

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK

Alkalmazható a teszt akkor is, ha avizeletgyűjtés vizeletes edénybe történt?

Igen, ha a vizeletet tiszta, száraz edénybe gyűjtötték. Ekkor merítse az abszorbeáló ablakokat a vizeletbe, tartsa ott legalább 10 másodpercig, majd várjon 5 percet az eredmény leolvasásához.

Hogyan működik a teszt?

A Corax-x terhességi tesztet nagyon kis mennyiségű hCG (humán choriogonadotropin) hormon kimutatására tervezték. Ez a speciális hormon egyre nagyobb mennyiségben választódik ki a terhesség első trimeszterében.

Mi a teendő pozitív eredmény esetén?

Pozitív teszteredmény esetén szakorvoshoz kell fordulni, akivel megbeszélheti a következő lépéseket és óvintézkedéseket. Ezen kívül a teszt-eredményt megerősítheti 3 nap elteltével egy másik Corax-x terhességi teszttel. Ne feledje, a terhesség korai felismerése rendkívül fontos az Ön és magzata egészsége érdekében.

Mi a teendő negatív eredmény esetén?

Ha a teszteredmény negatív, Ön valószínűleg nem terhes. Azonban ha a menstruációs vérzés a számított időponthoz képest 8 napon belül nem jelentkezik, célszerű megismételni a tesztet. Ha a második teszt eredménye is negatív és a vérzés sem indul meg, szakorvoshoz kell fordulni.

Mi a teendő, ha felmerül a gyanú, hogy a teszt eredménye nem pontos?

Ha pontosan követi a használati utasítást, nem kaphat hamis eredményt. Gondolni kell azonban arra, hogy bizonyos gyógyszerek és kezelések (pl. hCG-injekciók) hamis eredményhez vezethetnek.

Befolyásolja-e a megjelenő vonal színintenzitása a teszt eredményét?

Ha a teszteredmény pozitív, a vizelet hozzáadása után öt perccel a (nagyobb) tesztablakban vöröses-rózsaszín vonal jelenik meg. Nem fontos, hogy (kisebb) kontroll-ablakban megjelenő vonalhoz képest milyen a tesztvonal színintenzitása.

Változhat a teszt eredménye bizonyos idővel a teszt leolvasása után?

A teszt elvégzését követően a pozitív eredmény napokig megfigyelhető. Előfordul, hogy a teszt befejezését követően néhány órával a tesztablakban rózsaszín elszíneződés jelenik meg. A negatív ("nem terhes") eredményt a teszt-ablakban pontosan 5 perc után kell leolvasni. kb. 30 perc elteltével néhány teszt eredménye pozitívba csap át. Ennek az oka, hogy egyes reagensek 5 perc után is megtartják reagáló képességüket.



Gyártó: Core Technology Co., Ltd. Room 100, C Building,
No.29 Life Park Rd. Changping District, Peking, 102206 Kína



Európai Meghatalmazott Képviselő:
Wellkang Ltd. Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Rd. Derry, BT48 8SE, N. Ireland, UK

Forgalmazza: Lahra Kft., 2013 Pomáz, Huszár utca 13A fsz.5
Tel.: 0036/20 588 94 11



0197



Eff. Date:

03/10/2012

Engedélyszám: